


MODE D'EMPLOI

L'appareil à vapeur chaude ozonisée est l'idéal pour préparer la peau de votre cliente à recevoir vos soins du visage et du buste. Il génère une vapeur d'eau très fine qui en se déposant sur les couches superficielles de l'épiderme facilite l'élimination des cellules mortes et points noirs. Les pores se dilatent sous l'effet de la chaleur et la peau devient plus perméable aux soins et traitements. L'ozone, reconnu pour ses propriétés désinfectantes et oxygénantes, est recommandé pour les peaux à tendances grasses et acnéiques. Distiller quelques gouttes d'huiles essentielles sur le coussinet prévu à cet effet pour un soin avec aromathérapie.

Assemblage et Fonction

Ensemble comprenant l'appareil, un bouchon de remplissage, deux bras emboîtables, une tête orientable à 360° avec capot pour accéder au coussinet d'aromathérapie et un bocal.

Tableau d'affichage de l'appareil

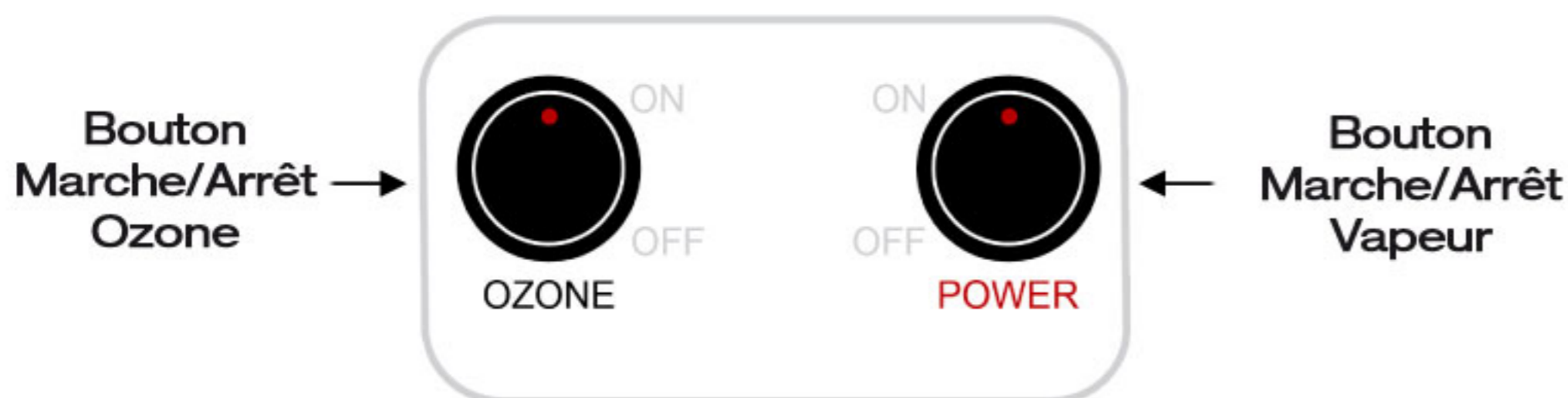

Fonctions des touches

Touche Power

Presser le bouton Power On/Off pour allumer ou éteindre l'appareil

Touche Ozone

Presser le bouton Ozone On/Off pour allumer ou éteindre la lampe ozone

Mise en service

- Emboîter les deux parties du bras l'une dans l'autre puis y ajouter la tête de diffusion
- Insérer le bras dans l'emplacement prévu à cet effet sur le haut de l'appareil
- Oter le bouchon de remplissage sur le dessus de l'appareil et remplir d'eau jusqu'au trait 'max' indiqué sur le bocal
- Relier le câble d'alimentation à une prise électrique


Conseils d'utilisation

Type de Peau	Distance Visage – Tête de diffusion	Durée d'utilisation
Peau grasse	25 cm	15 minutes
Peau normale	25 cm	10 minutes
Peau sèche et sensible	30 cm	5 minutes
Peau couperosée	30 cm	5 minutes


Utilisation standard

- Se reporter au tableau ci-dessus pour connaître le temps d'utilisation et la distance de diffusion
- Appuyer sur 'on' sur le bouton Power pour mettre en marche l'appareil, après le temps de préchauffe la vapeur commence à être diffusée
- Appuyer sur 'on' sur le bouton Ozone pour allumer la lampe si besoin, la vapeur s'intensifie et prend une teinte bleutée
- Positionner le bras de l'appareil et orienter la tête de diffusion de manière correcte et sécurisée vers le visage/buste de la cliente
- Lorsque le temps de soin est écoulé, arrêter l'Ozone en appuyant sur 'Off' sur le bouton Ozone puis arrêter l'appareil en appuyant sur 'Off' sur le bouton Power
- Débrancher l'appareil


Utilisation avec aromathérapie

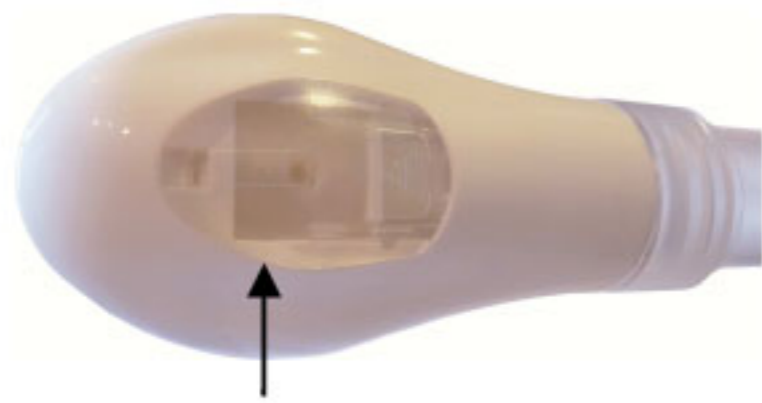

Capot Fermé

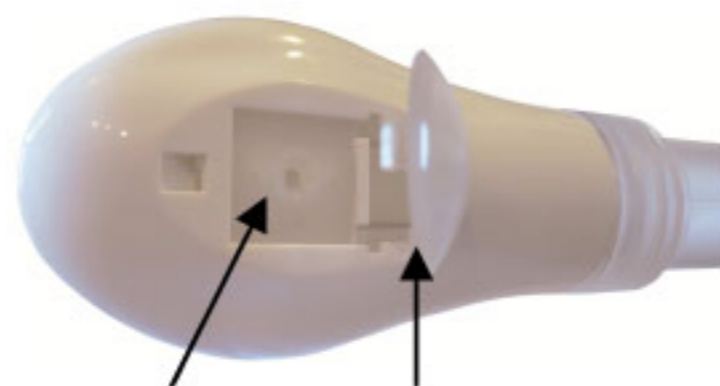

Carré de Gel Capot Ouvert

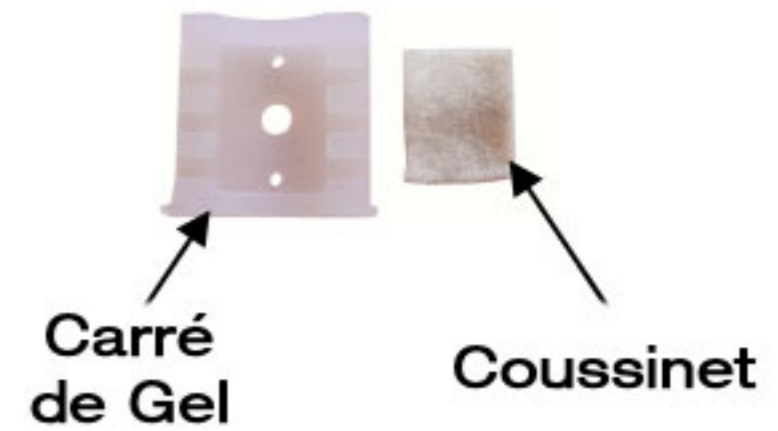

Carré de Gel

Coussinet

- Ouvrir le capot sur la tête de diffusion
- Distiller quelques gouttes d'huiles essentielles dans le petit trou du carré de gel, dessous se trouve un coussinet qui permettra leur diffusion

- Refermer le capot
- Poursuivre avec 'Utilisation standard'

Pour changer le coussinet et nettoyer le carré de gel :

- Ouvrir le capot sur la tête de diffusion
- Retirer le carré de gel et enlever le coussinet se trouvant en dessous
- Nettoyer le carré de gel avec de l'eau savonneuse et rincer
- Changer le coussinet
- Replacer le coussinet puis le carré de gel et refermer le capot

Informations complémentaires

- L'appareil ne produit plus de vapeur dès que l'eau atteint le niveau du trait 'min' sur le bocal.
- Pour remplir le bocal, arrêter complètement l'appareil en appuyant sur 'Off' sur les boutons Ozone puis Power et le débrancher, ouvrir le bouchon de remplissage et rajouter de l'eau jusqu'au trait 'max' indiqué sur le bocal. Appuyer sur 'On' sur le bouton Power, et sur le bouton Ozone si besoin, l'appareil se remet en marche.
- Utiliser un mélange de 50 % d'eau plate et 50% d'eau déminéralisée pour remplir le bocal
- Nettoyer l'appareil en utilisant un détartrant universel
- Il est possible de retirer le bocal en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sens 'Loosen' sur le bocal)

Caractéristiques Techniques

Voltage :	220-240V
Fréquence :	50Hz
Puissance :	450W

Précautions d'Emploi

- Assurer vous que l'appareil soit toujours placé sur une surface plane, stable et sûre
- Ne pas mouiller le boîtier de l'appareil
- Lors de la remise en place du bocal, veillez à ne trop le serrer afin de ne pas le fissurer ou le casser
- Toujours vérifier le bon état de fonctionnement de l'appareil avant utilisation. En cas de dommage ne l'utiliser pas et retournez-le à votre revendeur.
- En cas de fuite d'eau ou de vapeur, éteindre immédiatement l'appareil, attendre qu'il refroidisse puis vérifier l'étanchéité des joints et si besoin remplacer le(s). Si la fuite persiste n'utiliser plus l'appareil et contacter votre revendeur.



Ariès Esthétique
Espace Carros BP 446
06515 CARROS Cedex
contact@aries-esthetique.com
04.92.08.00.69